

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/opaska-podtrzymujaca-rzepke-p-61.html>



Opaska podtrzymująca rzepekę

Cena brutto	35,00 zł
Cena netto	28,46 zł
Czas wysyłki	Szybka Wysyłka 24h
Numer katalogowy	SN-EK

Opis produktu

Jest to opaska na kolano w kolorze czarnym wykonana z neopren, której głównym zadaniem jest podtrzymywanie rzepek w kolanie. Neopren jest materiałem powszechnie znanym ze swych właściwości utrzymywania ciepłoty ciała dzięki czemu ma znakomite działanie terapeutyczne i wspomaga krążenie. Opaska została zaprojektowana w taki sposób, aby zapewnić całkowitą ruchomość stawu przy jednoczesnym zabezpieczeniu rzepek przed przesuwaniem się.

Stosowanie opaski zalecane jest m.in. przy następujących dolegliwościach:

- nieprawidłowe przesuwanie się bądź umiejscowienie rzepek kolanowej
- zapalenia ścięgna mięśnia czworogłowego
- zapalenia ścięgna rzepek
- chondromalacja rzepek

Jest to produkt, którego należy używać w razie potrzeby w celu umiarkowanego podtrzymania rzepek.

Jest to produkt marki Tru-Fit™, która znana jest z produkcji produktów z kategorii medycyny sportowej. Marka znana jest z tego, że zapewnia optymalne wsparcie dla stawów przy jednoczesnym doskonałym dopasowaniu i komforcie użytkowania swoich produktów.

Produkty Tru-Fit™ są licencjonowane przez NASCAR®.

Opaska ta dostępna jest w rozmiarze UNIWERSALNYM.

Cechy opaski podtrzymującej rzepekę:

- wykonana z neoprenu
- nie zawiera lateksu
- całkowita długość opaski - 48 cm
- długość podtrzymującego kolano pręcika - 14 cm
- zapinana na rzepy
- otwór do przewleczenia rzepa
- kolor: czarny
- rozmiar uniwersalny
- estetyczne opakowanie

Instrukcja prawidłowego zakładania opaski:

-
1. Stań lub usiądź z wyprostowaną nogą.
 2. Umieść prętek podtrzymujący bezpośrednio poniżej rzepki, na ścięgnię.
 3. Przewlec koniec opaski przez otwór i ciągnij jednocześnie za oba końce.
 4. Przypnij opaskę za pomocą rzepów tak, aby była komfortowa.
 5. Aby zwiększyć ucisk na rzepkę, wyreguluj dodatkowo prętek podtrzymujący kolano zapinając go na rzep. Uważaj, aby nie ściągnąć za mocno, aby możliwy był swobodny przepływ krwi.

Instrukcja pielęgnacji: Produkt należy prać ręcznie w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem. Suszyć na powietrzu.

Do każdego zakupionego towaru wystawiamy **paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.