

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stalowy-chodzik-dwukołowy-z-siedziskiem-i-kołami-jmc-c-3511-p-139.html>



Stalowy chodzik dwukołowy z siedziskiem i kołami JMC-C 3511

Cena brutto	159,00 zł
Cena netto	147,22 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SN-TGO-PWP-JMC 3511

Opis produktu

Stalowy chodzik dwukołowy to bezpieczny, stabilny i niezwykle wytrzymały sprzęt pomocniczy, który stanowi niezawodne wsparcie w codziennym poruszaniu się. Sprzęt ten jest przeznaczony dla osób z obniżoną sprawnością ruchową, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Jest to również idealne rozwiązanie dla osób starszych, pomagające w utrzymaniu równowagi, poprawie komfortu poruszania się i zapobiegające upadkom. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją.

Konstrukcja opiera się na **stalowej ramie malowanej proszkowo**, którą można szybko i łatwo złożyć (wystarczy unieść siedzisko i pociągnąć do góry belkę łączącą zawiasy), co znacznie ułatwia transport oraz przechowywanie. Urządzenie wyposażono w szerokie siedzisko z wytrzymałego materiału, pozwalające na bezpieczny odpoczynek w trakcie spaceru. Anatomicznie wyprofilowane uchwyty dopasowują się do dłoni, a chromowane rurki zabezpieczają sprzęt przed zarysowaniami podczas zmiany wysokości rączek. Chodzik dostępny jest w estetycznym, niebieskim kolorze.

Cechy i zalety podpórki:

- solidna rama wykonana ze stali malowanej proszkowo,
- szybki i prosty system składania (wyposażony w zaciski blokujące i zawiasy),
- dwa stabilne, pełne koła o średnicy 6",
- płynna regulacja wysokości rączek,
- chromowane rurki przy uchwytach (odporne na zarysowania),
- szerokie, wygodne, szare siedzisko z wytrzymałego materiału,
- uchwyty o kształcie anatomicznym.

Wskazówki dotyczące prawidłowego użytkowania:

- **Odpowiednia postawa:** Wysokość uchwytów należy ustawić na takim poziomie, aby użytkownik stał wyprostowany (na tyle, na ile pozwala mu stan zdrowia), z ramionami w pozycji spoczynkowej i lekko ugiętymi łokciami. Obie rączki muszą być zablokowane na tej samej wysokości.
- **Rozłożenie ciężaru:** Niewskazane jest zawieszanie się na podporce całym ciężarem ciała. Sprzęt służy do asekuracji.
- **Bezpieczeństwo składania:** Należy zachować szczególną ostrożność podczas składania i rozkładania ramy, ze względu na ryzyko przytrzaśnięcia palców w zawiasach belki łączącej.

Wymiary i dane techniczne:

Szerokość całkowita	51 cm
Szerokość wewnętrzna	45 cm
Głębokość całkowita	60 cm
Wysokość uchwyty od podłoża	49 cm
Wysokość całkowita (regulowana)	82 - 97 cm
Wymiary siedziska	40 x 21 cm
Waga	5,76 kg
Maksymalne obciążenie	100 kg

Do każdego zamówionego towaru **wystawiamy paragon** lub na życzenie klienta **fakturę VAT**.