

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/stalowy-wozek-inwalidzki-skladany-basic-tim-p-1322.html>



Stalowy wózek inwalidzki składany BASIC-TIM

Cena brutto	459,00 zł
Cena netto	425,00 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SN-TGO-BASICTIM

Opis produktu

Stalowy wózek inwalidzki BASIC-TIM to niezawodny, klasyczny sprzęt rehabilitacyjny zaprojektowany z myślą o osobach mających problemy z samodzielnym poruszaniem się. Jego głównym przeznaczeniem jest ogólne zastosowanie codzienne: bezpieczny transport pacjenta, spacer na zewnątrz oraz przemieszczanie się na niewielkie odległości wewnątrz budynków. Sztywna rama wykonana z wysokiej jakości stali gwarantuje doskonałą stabilność podczas jazdy i bez problemu znosi bezpieczne **obciążenie do 115 kg**.

Model BASIC-TIM wyróżnia się przede wszystkim prostotą obsługi i wysoką trwałością. Konstrukcja oparta na pojedynczym krzyżaku pozwala na bardzo szybkie złożenie i rozłożenie wózka bez użycia nadmiernej siły, a jego waga po złożeniu (maksymalnie 17,5 kg) ułatwia przenoszenie. Wózek został wyposażony w profilowane ciągi, uchylne i całkowicie zdejmowane podnóżki oraz podłokietniki z praktyczną funkcją odchylania, co znacząco ułatwia pacjentowi przesiadanie się np. na łóżko. Na oparciu znajduje się również wygodna kieszeń na podręczne drobiazgi.

W trosce o maksymalny spokój użytkownika oraz na dowód wyjątkowej trwałości, sprzęt został objęty dedykowanym programem ochronnym. Producent zapewnia standardową **24-miesięczną gwarancję** na podzespoły eksploatacyjne oraz aż **60-miesięczną (5-letnią) gwarancję na stalową strukturę ramy**.

Dostępne warianty i konfiguracja wózka (Wybierz z listy opcji):

Aby wózek BASIC-TIM idealnie odpowiadał na Twoje codzienne potrzeby, przygotowaliśmy możliwość wyboru optymalnej konfiguracji. Przed dodaniem do koszyka wybierz odpowiedni wariant:

- **Rozmiary siedziska (43 cm, 46 cm, 48 cm):** Pozwalają na precyzyjny dobór szerokości wózka do gabarytów i wygody pacjenta.
- **Wybór rodzaju kół tylnych (Pełne lub Pompowane):** Wersja z kołami pełnymi (gumowymi) jest całkowicie bezobsługowa i odporna na przebicia. Wersja z kołami pompowanymi (pneumatycznymi) doskonale amortyzuje nierówności na zewnątrz. *Uwaga: ten model nie posiada systemu szybkozłączki.*
- **Wariant z regulacją kąta podnóżków (Opcja):** Możliwość doposażenia wózka w podnóżki pozwalające na płynną regulację kąta ugięcia nóg. Polecane po zabiegach ortopedycznych lub przy obrzękach.

Cechy i zalety wózka BASIC-TIM:

- wytrzymała, stalowa rama malowana na kolor srebrny (udźwig do 115 kg),

- **wydłużona gwarancja dla Twojego spokoju: 24 miesiące na sprzęt i aż 60 miesięcy (5 lat) na ramę,**
- prosty i szybki system składania na pojedynczym krzyżaku,
- podłokietniki z funkcją uchylania (ułatwiające przesiadanie się),
- uchylne i całkowicie zdejmowane podnóżki w standardzie,
- możliwość wyboru kół tylnych: amortyzujące pompowane lub bezobsługowe pełne (24"),
- wytrzymałe, pełne gumowe koła przednie (8") odporne na ścieranie,
- praktyczna kieszka na podręczne drobiazgi umiejscowiona z tyłu oparcia,
- w zestawie: taśma zabezpieczająca łydki, klucze montażowe oraz pompka (przy wyborze kół pompowanych).

Wymiary i dane techniczne:

Dostępne szerokości siedziska	43 / 46 / 48 cm
Materiał ramy	Stalowa
Sposób składania	Na pojedynczym krzyżaku
Koła tylne (24") / przednie (8")	Pompowane lub Pełne / Pełne gumowe
Demontaż kół tylnych (Szybkozłaczka)	Nie
Hamulce	Postojowy pacjenta: Tak / Dla opiekuna: Nie
Maksymalne obciążenie pacjenta	115 kg
Waga całkowita sprzętu	16,8 - 17,5 kg (w zależności od rozmiaru)
Kolorystyka	Rama: Srebrny Tapicerka: Czarny

Najczęściej zadawane pytania (FAQ):

1. Czy wózek BASIC-TIM sprawdzi się podczas spacerów na zewnątrz?

Tak, to jedno z jego głównych przeznaczeń. Solidna stalowa rama i duże, 24-calowe koła napędowe pozwalają na bezpieczne i wygodne spacerowanie. Jeśli wózek ma być używany głównie na zewnątrz (na chodnikach czy alejkach parkowych), rekomendujemy wybór wariantu z kołami pompowanymi, które zdecydowanie lepiej amortyzują nierówności.

2. Jak złożyć wózek oparty na pojedynczym krzyżaku?

Składanie jest bardzo proste i intuicyjne. Należy stanąć obok wózka (z zaciągniętymi hamulcami), chwycić za środek materiałowego siedziska (z przodu i z tyłu) i pociągnąć je stanowczym ruchem do góry. Mechanizm krzyżakowy zwolni blokadę, a boki wózka zsuną się do siebie, tworząc kompaktową formę do transportu.

3. Co to znaczy, że podłokietniki mają funkcję uchylania?

Oznacza to, że po zwolnieniu blokady (zazwyczaj niewielkiej dźwigni przy przedniej części podłokietnika) można go odchylić do tyłu – zupełnie jak oparcie fotela w samochodzie. Dzięki temu z boku wózka tworzy się wolna przestrzeń, co umożliwia pacjentowi bezpieczne i wygodne "zsuniecie się" na łóżko, toaletę czy fotel samochodowy bez konieczności wstawania.