

Link do produktu: <https://sklep.salenet.pl/wozek-rehabilitacyjny-dzieciacy-swifty-thomashilfen-p-1324.html>



Wózek rehabilitacyjny dziecięcy Swift – Thomashilfen

Cena brutto	6 264,00 zł
Cena netto	5 800,00 zł
Czas wysyłki	2-3 tygodnie
Numer katalogowy	SN-TGO-TH-SWIFTY

Opis produktu

Wózek Swift to lekki, składany wózek rehabilitacyjny dla dzieci o specjalnych potrzebach – z nowoczesnym, „niemedycznym” wyglądem. Stabilne, stałe siedzisko sprawdza się w codziennych sytuacjach i jest błyskawicznie gotowe do użycia.

Dostępny w dwóch rozmiarach – **Swift 1** (dla mniejszych dzieci, do 35 kg) oraz **Swift 2** (dla większych, do 50 kg i wzrostu do 150 cm). Składanie jedną ręką, regulacje bez użycia narzędzi oraz oddychające, prane tkaniny zapewniają komfort dziecku i wygodę opiekunowi.

Najważniejsze cechy

- Wyjątkowo szybkie i proste składanie
- Stabilne podparcie stóp, siedziska i pleców
- Regulacja głębokości siedziska bez narzędzi
- ...także gdy dziecko siedzi wózku
- Regulacja kąta oparcia dźwignią
- Pozycja spoczynkowa do odpoczynku
- Składany, regulowany podnóżek
- 5-punktowe pasy z miękkimi szelkami
- Obrotowe koła przednie z blokadą
- Bezdętkowe koła EVA (bezobsługowe)

Wyposażenie standardowe

Lekka, składana rama ze zintegrowanym siedziskiem, zaczepy transportowe (crash), 5-punktowe pasy z pasem krokowym, trudnopalne i oddychające tkaniny, oparcie z regulacją kąta, płynna regulacja głębokości siedziska, obrotowe koła przednie z blokadą, regulowany i odchylany podnóżek, hamulec nożny, regulowana wysokość rączki oraz uchwyt na daszek przeciwśloneczny/przeciwdeszczowy.

Dodatkowe wyposażenie (akcesoria)


Najedź na zdjęcie, aby je powiększyć. Akcesoria oznaczone przełącznikami dostępne są w kilku wariantach – kliknij, aby zobaczyć.



Klin odwodzący Utrzymuje prawidłowe ułożenie nóg dziecka.



Pałak / poręcz Wygodne podparcie rąk i dodatkowe zabezpieczenie.

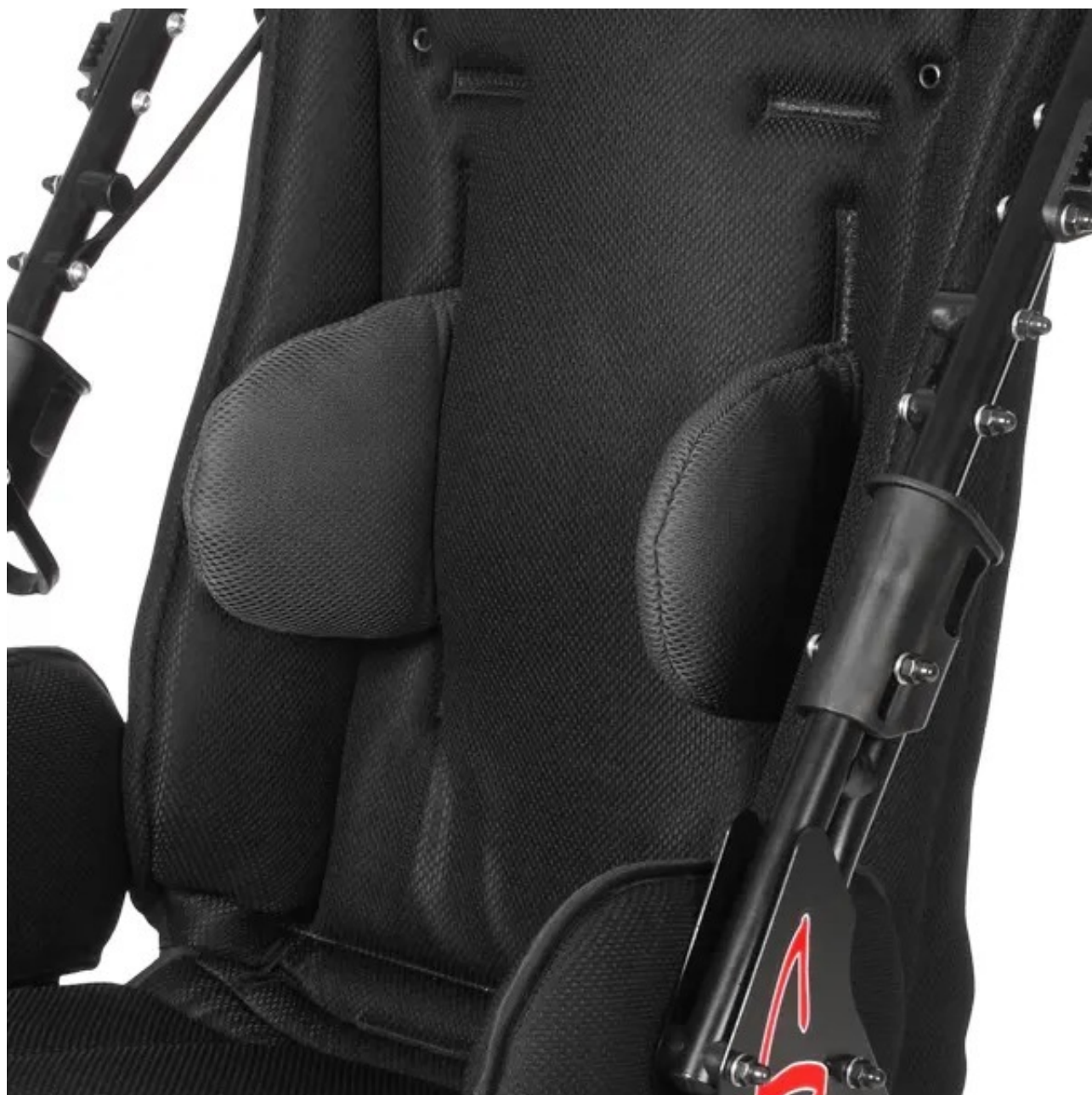



Peloty tułowia Boczne podparcie tułowia dziecka.
Szttywne Elastyczne



Boczna tapicerka siedziska Czerwone boczne podparcie siedziska.



Kamizelka stabilizująca Stabilizuje tułów dziecka (zapinana na zamek).






Pas motylkowy Stabilizacja tułowia w kształcie X.
Szttywny Elastyczny



Pas biodrowy 2-punktowy Stabilizuje miednicę dziecka.



Miękki pas biodrowy Delikatne podtrzymanie w pozycji siedzącej.

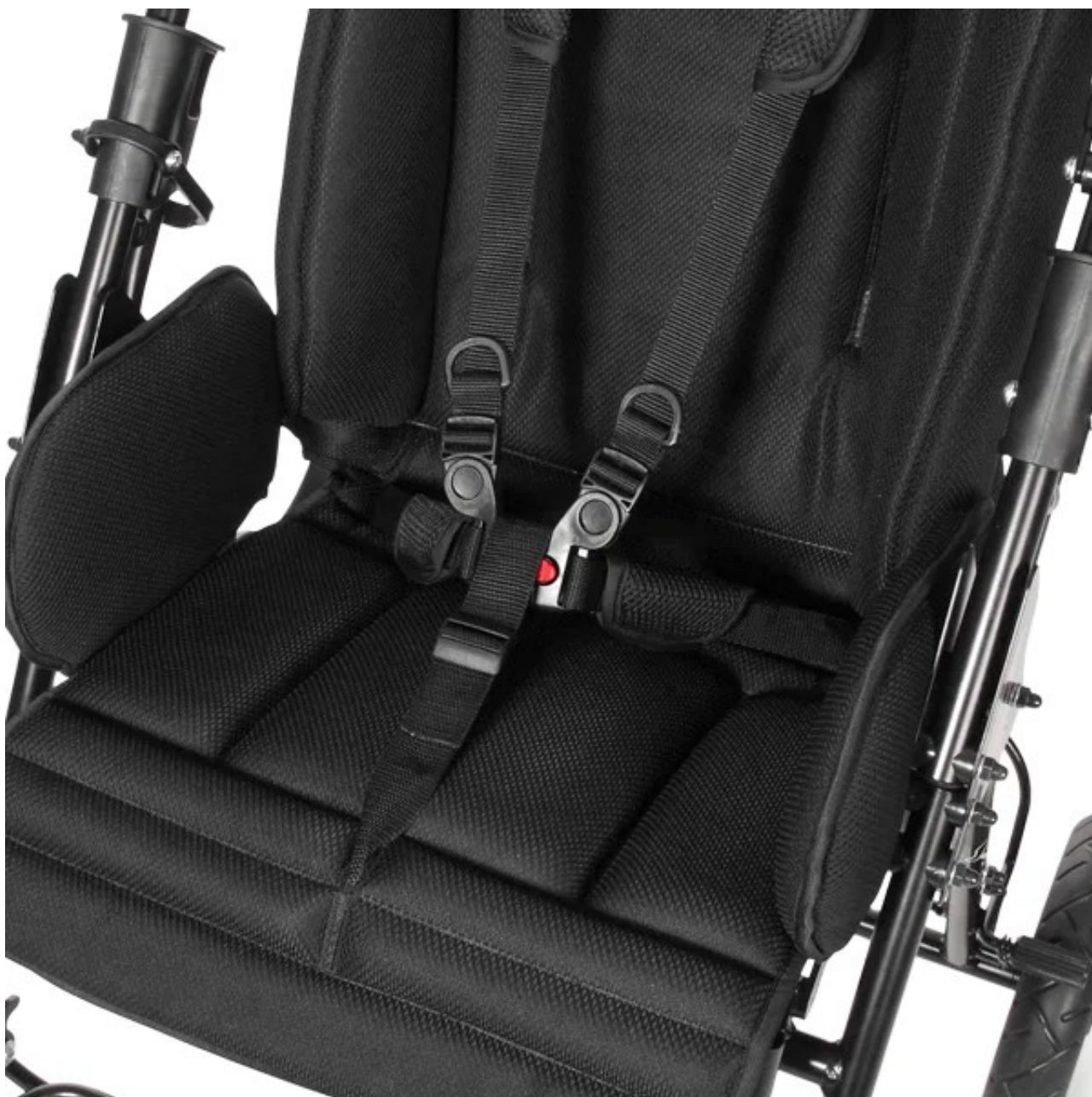

Pas krokowy Zapobiega zsuwaniu się dziecka do przodu.



Paski na stopy Utrzymują stopy dziecka na podnóżku.





Poduszka pod głowę Stabilizuje głowę dziecka.
Czarna Czerwona





Tapicerka biodrowa Wymienne pokrycie okolic bioder.
Czarna Czerwona





Tapicerka oparcia Wymienne pokrycie oparcia.
Czarna Czerwona





Wyściółka ramy Miękka osłona boków ramy.
Czarna Czerwono-czarna



Nakładka na podnóżek Miękka wyściółka podnóżka.



Tacka transparentna (stolik) Przezroczysty stolik do zabawy i posiłków.



Daszek z kocem na nogi Budka z ociepleniem i kocem na nogi.



Daszek przeciwsłoneczny/deszczowy Chroni przed słońcem i deszczem.



Ostona przeciwdeszczowa Przezroczysta ochrona przed deszczem.



Folia przeciwdeszczowa Pełna osłona przed deszczem i wiatrem.



Parasol przeciwsłoneczny Osłania dziecko przed słońcem (filtr UV).



Śpiwór ocieplany Ochrona przed chłodem (futerko).



Koszyk Pojemny schowek pod siedziskiem.



Koła pompowane (zestaw) Komplet kół pompowanych — komfort w terenie.

Swifty 1 i Swifty 2 - porównanie wymiarów

Głębokość siedziska	22 (17) - 28,5 cm	34 (24,5) - 40 cm
Szerokość siedziska	34 (23) cm	39,5 (29,5) cm
Wysokość oparcia	62 cm	70 cm
Min. wysokość barków	37 (26) cm	47 (30) cm
Długość podudzia	16 (12) - 33 cm	21 (21) - 37 cm
Kąt zgięcia w stawie biodrowym	90° - 115°	90° - 100°
Kąt nachylenia podnóżka	90°	90°
Stały kąt pochylenia siedziska (tilt-in-space)	+15°	+20°
Wymiary podnóżka (szer. x gł.)	31 x 18 cm	31 x 20 cm
Wysokość rączki	80 - 119 cm	82 - 124 cm
Koła przednie (obrotowe)	18 cm	18 cm

Koła tylne	25 cm	25 cm
Wymiary całkowite (szer. x wys. x dł.)	61 x 102 x 98 cm	67 x 113 x 98 cm
Wymiary po złożeniu (szer. x wys. x dł.)	61 x 38 x 73 cm	67 x 49 x 79 cm
Waga wózka	12,4 kg	18,6 kg
Maks. obciążenie	35 kg	50 kg
Wzrost użytkownika (orientacyjnie)	—	do 150 cm

Wartości w nawiasach dotyczą wózka z założoną redukcją siedziska (akcesorium dla mniejszych dzieci). Dane producenta Thomashilfen, status broszury: 2020-08.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Dlaczego muszę przestrzegać maksymalnej wagi dziecka?

Limit obciążenia obejmuje nie tylko dziecko, ale też zawartość koszyka, tacki i toreb. Przekroczenie go grozi uszkodzeniem elementów mocujących oraz zwiększa ryzyko wywrócenia wózka. Dopuszczalną wagę znajdziesz w instrukcji i na tabliczce znamionowej ramy.

Czy mogę samodzielnie wyregulować wózek, gdy dziecko urośnie?

Podstawowe ustawienia (głębokość siedziska, kąt oparcia) możesz zmienić sam. Górna krawędź oparcia powinna sięgać czubka głowy dziecka, a między przednią krawędzią siedziska a zgięciem kolan warto zostawić odstęp około dwóch palców. Przy bardziej złożonych regulacjach pomoże terapeuta lub sklep specjalistyczny.

Czy wózek można używać jako siedzisko w samochodzie?

Tylko jeśli model jest do tego przystosowany i dopuszczony przez producenta (wersja „crash” z punktami mocowania oraz certyfikowany zestaw transportowy tie-down). Wersja standardowa nie jest przeznaczona do przewozu dziecka w pojeździe.

Dlaczego nie należy wieszać toreb na ręczce?

Torby zawieszane na ręczce wiszą wysoko i daleko od środka ciężkości wózka, co znacznie zwiększa ryzyko przewrócenia. Zakupy najlepiej wozic w koszyku producenta, pamiętając o maksymalnym obciążeniu.

Po co przednie koła skrętne z blokadą?

Obrotowe koła zapewniają zwrotność w ciasnych przestrzeniach. Na nierównym terenie warto je zablokować – wtedy prowadzenie i pchanie wózka jest łatwiejsze.

Jak długo można używać wózka?

Wózki rehabilitacyjne nadają się do ponownego użytku. Ich żywotność zależy od prawidłowego użytkowania i regularnej konserwacji. Szczegółowych informacji o stopniu zużycia udzieli lokalny sklep specjalistyczny.

Do czego służy klin odwodzący?

Klin utrzymuje prawidłowe ułożenie nóg na wysokości kolan – nie służy jako „blokada” przed zsuwaniem się dziecka. Jeśli dziecko zsuwa się do przodu, stosuje się pas biodrowy lub miękki pas biodrowy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Model wózka: Swift 1 , Swift 2 (+ 1 080,00 zł)

Wyposażenie dodatkowe: Brak , Klin odwodzący (+ 450,00 zł), Pałak (+ 335,00 zł), Boczna tapicerka siedziska (+ 725,00 zł), Peloty tułowia (+ 920,00 zł), Pas motylkowy (+ 490,00 zł), Kamizelka zabezpieczająca (+ 520,00 zł), Miękki pas biodrowy (+ 455,00 zł), Pas biodrowy 2-punktowy (+ 345,00 zł), Koszyk (+ 280,00 zł), Śpiwór ocieplany (+ 1 000,00 zł), Parasol przeciwsłoneczny (+ 290,00 zł)